



Wave

Red Light Therapy

WAVE RLT PEN & WAVE RLT PEN 2.0



W W W . C A V A L E R O S . D K

Version 1.0


WAVE Red Light Therapy er udviklet af Cavaleros Denmark
Vi har udtænkt en ny måde at kunne behandle med dokumenteret lysterapi.

Det er nærmest kun fantasien der sætter grænser.

Vi udvikler hele tiden på vores produktserie og laver tillægsprodukter som gør det nemt for dig at behandle dit dyr, så den er klar til at yde på topplan!

Vi glæder os til at vise Jer de nye produkter i fremtiden!

100% dansk design og idé

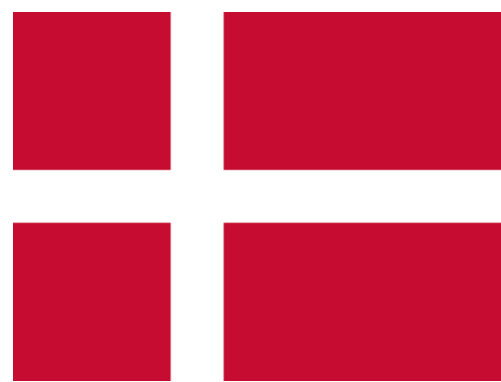

Vi vil rigtig gerne være behjælpelig hvis du har spørgsmål.
Du skal du kontakte din dyrlæge hvis det drejer sig om faglige spørgsmål som har med en skade at gøre.

Vi modtager gerne "cases" og feedback fra vores kunder.

Kontakt os på
customercare@cavaleros.dk
eller på tlf +45 6073 7722

Vi glæder os til at høre fra dig!

Cavaleros Denmark
Middelfartvej 6E
DK-4200 Slagelse

Vigtig viden før brug

Batterierne er fuld opladet når du modtager dit produkt - så kan du hurtigt kan starte behandlingen

Overbrug af WAVE kan ikke skade din hest

Vær altid opmærksom på dit dyr når du bruger WAVE og efterlad det aldrig alene

Dyr er sensitive væsner.

Brug aldrig WAVE RLT på en tumor med mindre at du gør det i samråd med en dyrlæge

Brug ikke produktet på diegivende eller gravide - dyr eller mennesker.

Vær opmærksom på at behandle dit dyr hvis det får medicin for lysfølsomhed så som Tetracyclin

Brug aldrig produktet hvis hesten står i vand

Beskyt ledning og adapter og brug kun originale ledninger osv til brugen

Brug af batteriet på et andet produkt kan skade batteriet. Det er lavet specielt til WAVE så det skal kun bruges til WAVE.

Lad ikke dyret bide eller lege med produktet

Hvis produktet er beskadiget skal du ikke bruge det!

Lad ikke din hest træde på produktet!

Påfør aldrig salver, cremer eller andet FØR behandlingen med WAVE

Cavaleros er ikke erstatningspligtig hvis din dig/hest/hund eller du kommer til skade ved brug af WAVE produkterne.

Søg altid råd hos din dyrlæge hvis du er i tvivl

Reparerer aldrig på WAVE RLT, DC stik, batteri eller oplader

Vi yder 2 års reklamationsret mod fabrikationsfejl - ikke slidtage eller hvor produktet er ødelagt på grund af forkert brug, eller ved at tabe produktet

Reklamationsretten bortfalder hvis ikke du behandler WAVE RLT som foreskrevet



Vigtig viden før brug

Se aldrig direkte ind i lyset
Skærm lyset for øjet på dit dyr
Efterlad aldrig produktet på din hest eller dyr uden opsyn
Sæt dit dyr er et behageligt sted, gerne et sted med ro.
Brug kun produktet på hest som er opbundet!
Lad aldrig din hest/hund gå rundt med produktet på
Brug kun originale ladere eller batterier til produktet
Efterlad aldrig din WAVE RLT samt batterier i et fugtigt miljø
WAVE RLT tåler ikke at komme i vaskemaskinen
WAVE RLT rengøres forsigtigt med hårdt opvredet klud - og aldrig nær DC stikket

Hav aldrig din WAVE RLT tændt i mere end 5 minutter ad gangen og med en pause på 1-2 minutter

Læg ALDRIG din oplader og batteri i solen mens den lader. Der er fare for overophedning og eksplosion!

Hvis du oplever mislugt fra produktet så stop med at bruge det med det samme!

Det kan have en skade!

Produktet kan bruges i MAX +30 graders varme og må ALDRIG efterlades i solen!

Oplad kun batteriet i MAX 1-3 timer - det er et hurtigopladende batteri.

Lad ALTID dit batteri langt væk fra letantændelige genstande!

Lad dit batteri på et stengulv eller flisegulv.

Opbevar ALDRIG dit batteri i meget varme eller kolde omgivelser eller i direkte sollys - opbevares i stue temperatur 20-25 grader


Brug ALDRIG et produkt der er skadet på nogen måder!

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede.

På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

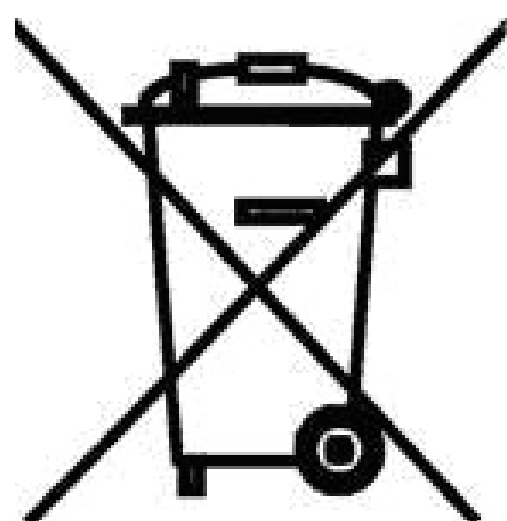

Dette skal du være opmærksom på ved at bruge vores WAVE PEN & WAVE PEN 2.0

Kig ALDRIG ind i WAVE RLT PEN og lys aldrig i andres øjne. Lyset er meget kraftigt. Brug altid briller hvis du bruger den tæt på øjnene. Brug den aldrig i nærheden af dyrs øjne.

Den må på ingen måder komme i kontakt med vand! Brug pudsekluden til at holde glasset rent.

Hvis du skal tæt på øjet, så skræm med din hånd, så du er sikker på at du ikke rammer dyrets øje.

Brug ikke produktet på gravide dyr eller mennesker.

Tillad ikke at enheden får fugt eller ligger i et fugtigt miljø. Opbevar den altid i et køligt, mørkt rum. Aldrig i direkte sollys.

Der er fare for overophedning af batterierne.

Hvis du ikke skal bruge den i en længere periode (1 måned +) så tag batteriet ud af enheden. På den måde passer du bedre på produktet.



Sæt altid den medlagte snor fast i enheden og sæt den på handledet når du behandler.

Taber du enheden og glasset går i stykker - kan det IKKE skiftes. Og vi anbefaler ikke at du fortsætte med at bruge den.

Vi yder 24 mdr. reklamationsret iflg. købeloven.

Levestid på produktet: 50.000 timer

Batteri-type: 18650




Hvorfor lysterapi?

Behandling med rødt lys med en helt specifik bølgelængde styrker cellefornyelsen og er kendt som ATP-booster. Lysbehandling har en gavnlig effekt på mange områder.


LED terapi-lysenes specifikke bølgelængder øger cirkulationen og øger dannelsen af nye kapillærer. De nye kapillærer fremskynder helingsprocessen ved at transportere mere ilt samt flere næringsstoffer til områder. Samtidig transporteres flere affaldsstoffer væk.

Kollagen er det mest almindelige protein der findes i kroppen og er et vigtigt protein der erstatter og reparerer beskadiget væv. Flere undersøgelser viser at LED-Terapi-lys stimulerer produktionen af kollagen og derved mindskes arvæv.

Lysterapi er medicinsk godkendt til mennesker i USA og bruges som smertelindring og mod inflammation!

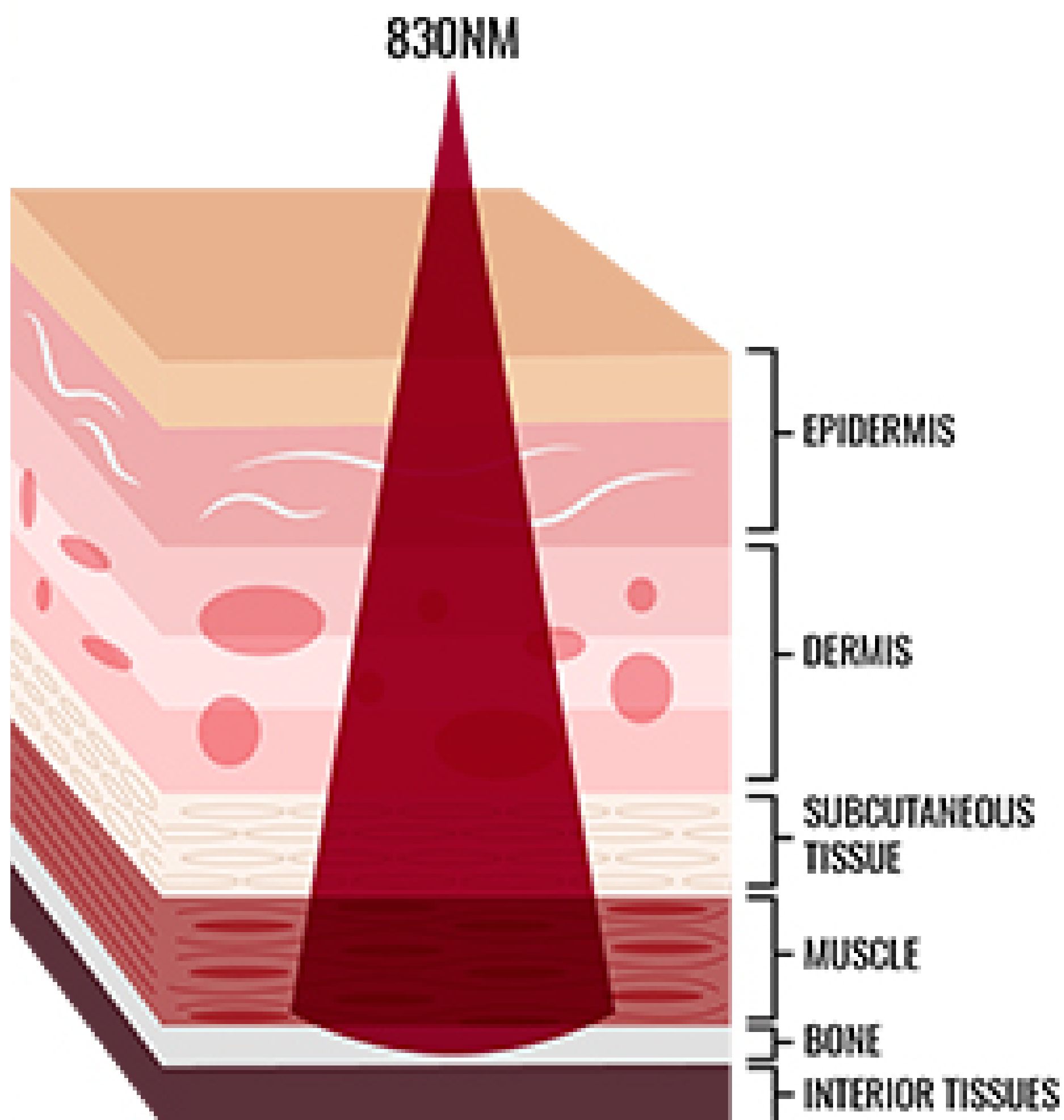

Hvad betyder de forskellige bølgelængder?

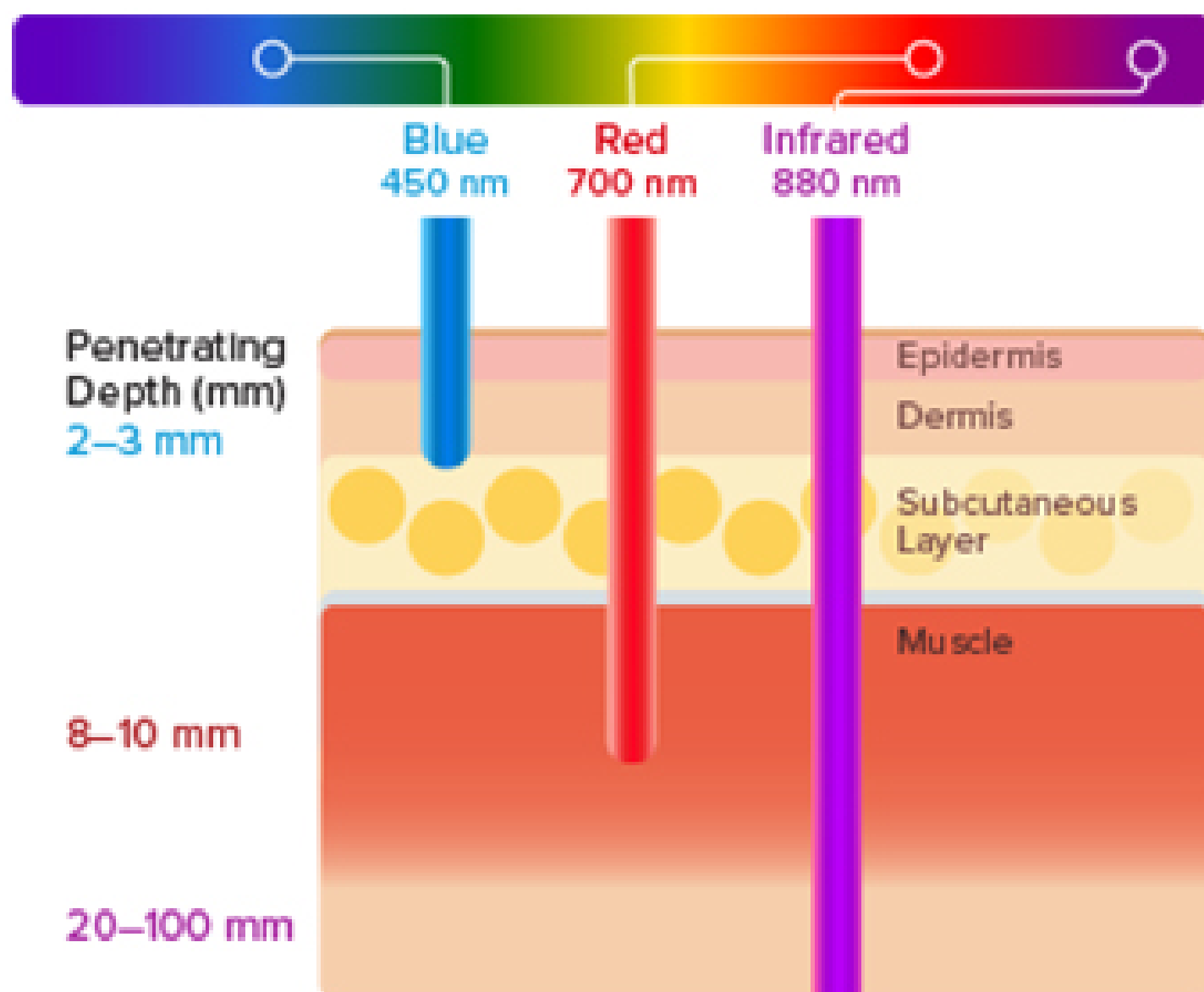

De forskellige bølgelængder er med til at bestemme hvor dybt de behandler.

De mest brugte bølgelængder er de røde og infrarøde da de når dybest ind i vævet.

Derfor bruger man også tit rødt lys til behandling af sår så det heler indefra og ikke kun på ydresiden. Det blå lys bruges typisk til acne-behandling da man kun arbejder i det øverste tynde lag hud.

Der er stor forskel på brugen af FIR & NIR.


FIR (Far infra red light) det føles som varme og øger blodcirkulationen. Det kan også være din egen kropswarme der bliver sendt ind i kroppen. Det har ingen behandlende effekt på cellerne. Men giver velvære.

NIR (nær infra rødt lys) behandler på celleniveau og regenererer cellerne og tilfører energi som er cellernes drivkraft og giver en effektiv og dokumenteret behandling. Afgiver IKKE varme!


Vi bruger kun de bølgelængder der har dokumenteret effekt i det spektrum af lys hvor der er lavet studier, nemlig 630 nm rødt lys samt 900 nm Nær Infrarødt lys

Wave Length in Nanometers (nm)


The 5 Bioactive Forms of Light

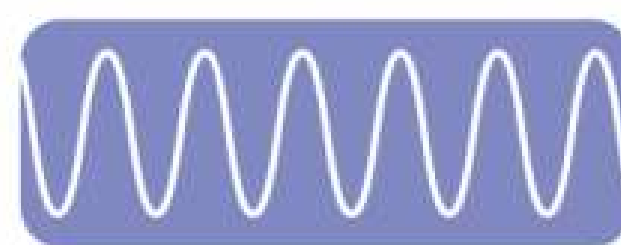


UV Light interacts with our skin to make vitamin D, a regulator of over 2000 genes in our body, affects the immune system and is linked with all kinds of disease and mortality outcomes.

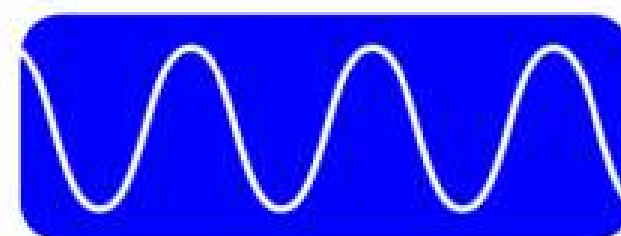


Blue Light enters your eyes, feeds back through nerves into a part of the brain called the suprachiasmatic nucleus, where your circadian clock lies. The circadian clock in our brain regulates different hormones and neurotransmitters that affect metabolism, appetite, energy levels, mood, wake, and sleep cycles.

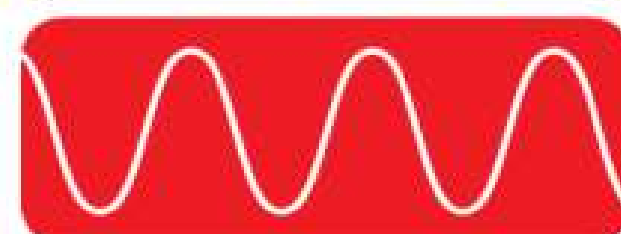

Red Light electromagnetic waves at the end of the visible spectrum.

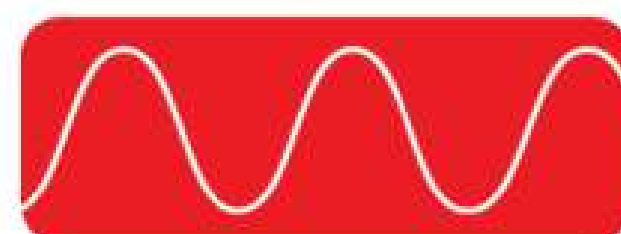

Near-Infrared Light is not visible. Red and near-infrared light can penetrate inches into the body where they directly interact and modulate the function of cells.

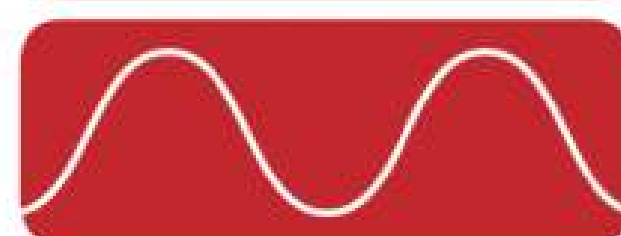


Far Infrared Light
We feel it as heat in our bodies. It affects things like circulation and blood flow.

WAVE RLT stimulerer frigivelsen af adenosintrifosfat (ATP). ATP er den største energi-bærer til alle celler og leverer den kemiske energi, der driver den kemiske reaktion i cellen. Stigninger i ATP giver cellerne mulighed for at bruge næringsstofferne hurtigere og slippe af med affaldsstoffer.

WAVE RLT øger også lymfesystemets aktivitet.

Derfor kan man også se effektive behandlinger med WAVE Red light Therapy. Man ser op til 200% hurtigere heling med lysterapi.

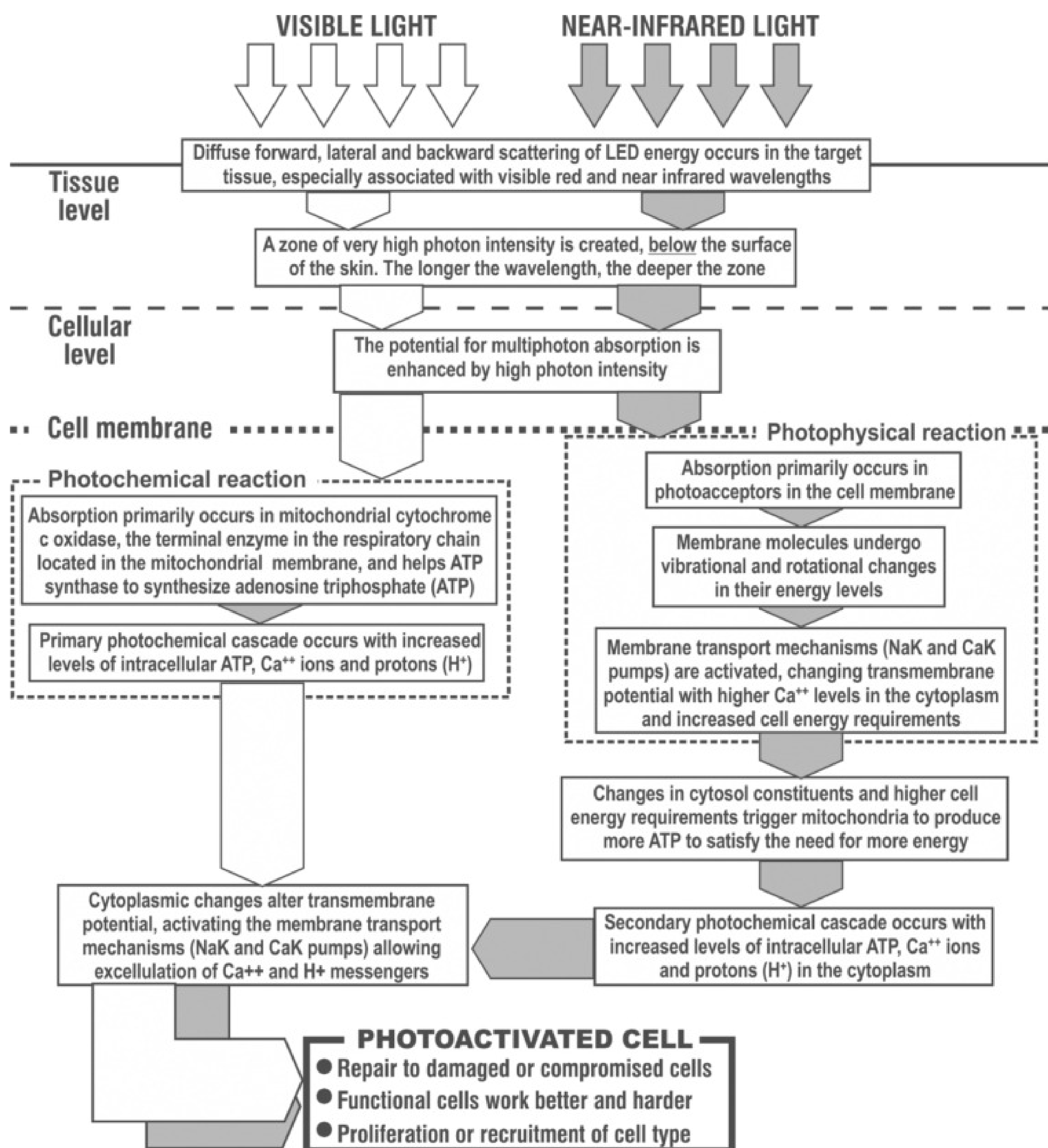

Sådan kommer du i gang

Din WAVE RLT PEN er klar til at bruge når du modtager den. Vi har sørget for at batterierne er ladet op, så du kan starte behandlingen lige med det samme. Du skal bare sætte det ene batteri i PEN'en - du åbner PEN'en ved at skrue enheden fra hinanden.

Det er vigtigt at du behandler så tæt på huden så muligt. De stærkeste bølgelængder når typisk ca 20-100 mm in i vævet, afhængig af vævstype.

|

Du kan behandle et større område ved at øge afstanden til huden, men det gør også behandlingen mindre. Men da produktet er meget kraftigt så vil du også kunen opnå en god effekt - også på afstand. Dog max 10-15 cm væk fra huden.

Vi har en god erfaring med at bruge lysterapi før og efter træning, og ved at øge behandlingen ved mere alvorlige skader.

Spørg altid din behandler eller dyrlæge hvis du er i tvivl - kontakt altid din dyrlæge ved alvorlige skader.



WAVE RLT PEN

WAVE RLT PEN

Smart lille håndholdt lysterapi pen til de steder hvor du har brug for intens behandling og hvor det er svært at komme til.

God til akupunktur punkter, triggerpoints, inde i øre, små sår, sacoider, hove, hovbylder, knæskader, spot-behandling.

Er med 3 bølgelængder

Rødt lys: 660 nm - synlig

Dyb rødt lys: 730 nm - meget svagt synlig

Nær-infarød lys: 850 nm - ej synlig

Behandlingstid 1-3 minutter

Effekttæthed: 217 mW/cm²

Slukker efter 5 minutters brug

Medfølger sikkerhedsbriller, etui, pudseklud til linsen, oplader, 2 stk genopladelige batterier, samt strop der kan vedhæftes bunden af WAVE RLT PEN

PRIS: 800,- Dkk



Funktioner i WAVE PEN



Bølgelængder: 660, 730, 850nm (730 + 850 nm er usynlige for det menneskelige øje)
Timer: Slukker automatisk efter 5 minutters brug - hold en pause på 1-2 minutter eller indtil enheden er kølet ned.

1)TRYK 1 gang. Alle LED lyser på én gang

2) TRYK 2 gange. Enheden slukker

Når enheden automatisk slukker efter 5 minutter skal du trykke 2 gange for at tænde den igen

Mål: 25 x 125 mm

Materiale: Rustfrit stål

Effektstæthed: På overfladen: 217 mW/cm²

Netto vægt: 200 g

Bølgelængder: 660, 730, 850nm

Effektstæthed: 8 cm fra 50mW/cm²

Pakken indeholder:

WAVE RLT PEN

Opbevaringstaske med lynlås

2 stk genopladelige batterier 18650

Batteri-oplader

USB stik til oplader

Beskyttelses-briller

Brugermanual

Klud

Sådan bruger du WAVE RLT PEN

I vores WAVE RLT PEN bruger vi en kombination af 3 forskellige LED'er, som er udvalgt til at give den bedste biologiske effekt overalt på kroppen.

De 3 lysbølger er 660 nm rødt lys, 730 dybrødt lys (meget lidt synlig), 850 nm nær-infarødt lys (usynlig for det menneskelige øje)

Bemærk at du kun vil se det som om at 1 lys er tændt - de 2 andre udsender lysbølger som du ikke kan se. Det er helt normalt.



Nogle heste oplever effekten af lysterapi næsten med det samme, andre oplever det over en længere periode på ca. 3 uger.

Det afhænger meget af skaden, og alderen på skaden.

Derfor anbefaler vi at man bruger en 3-ugers plan - før man sammenligner effekten.

Hvis du oplever effekten med det samme, så skal du fortsætte med at behandle.

Oplever du ikke at hesten reagerer så er det også normalt. Du skal blot fortsætte med at behandle, men øge behandlinger fra 1 gang om dagen, til 3 gange om dagen, med op til 3 minutters varighed, i 3 uger.

Efter 3 ugers konstant behandling vil de fleste heste mærke en forandring.

Hvis du behandler med et andet produkt, så skal du ikke pludseligt stoppe den behandling, når du begynder på lysterapi, med mindre du føler at behandlingen ikke virker.

Du kan sagtens fortsætte din behandling fra dyrlægen, men hør altid dyrlægen ad, om det har nogen dårlig virkning hvis du behandler med lysterapi.

Dyrlægerne vil sjældent bede dig om IKKE at bruge lysterapi.

Hold WAVE RLT PEN hen over det område du vil behandle. Du kan enten holde den helt ind til huden, eller op til 15 cm fra. Jo længere væk desto svagere behandling.

Brug ikke WAVE RLT PEN i mere end 5 minutter af gangen. Hold en pause mellem hver behandling på ca. 1-3 minut eller til enheden er kølet lidt ned. Så undgår du overophedning af enheden.

Vejledning til behandling WAVE RLT PEN

En simpel behandling

WAVE RLT PEN kan ikke dele bølgelængderne op. Men fortvivl ikke. Du vil stadig kunne opleve en stor effekt. Overskydende energi/lys kan ikke påvirke negativt.

Lysterapi har ingen bivirkninger og kan ikke gøre skade på hverken væv eller celler.

Ønsker du en mere specifik behandling så skal du prøve vores WAVE RLT PEN 2.0

Vejledning til behandling med WAVE RLT PEN

Nær infrarød + rødt lys behandling

Bølgelængder nm	660, 730, 850	
	Rødt lys & Nærinfra rødt lys	
Skade		Behandlingstid
Sarcoider meget små og kun overfladiske	1-3 minutter	1 gang dagligt
Sarcoider dybe og store	1-3 minutter	1-3 gange dagligt
Forbyggelse af skader før træning	1-3 minutter	hver 5. - 6. dag pr område
Forbyggelse af skader før efter træning	1-3 minutter	hver 5. - 6. dag pr område
Svamp	1-3 minutter	1 gang dagligt
Muk	1-3 minutter	1 gang dagligt
Muk plus smerte	1-3 minutter	1-3 gange dagligt
Sår	1-3 minutter	1-2 gange dagligt
Sår kroniske eller gamle sår	1-3 minutter	1 gang dagligt
Sår med smerte	1-3 minutter	1-3 gange dagligt
Hot spot	3-5 minutter	1 gang dagligt
Inflammation/rødme	3-5 minutter	1-3 gange dagligt
Betændelse fra sår	1-3 minutter	1-3 gange dagligt
Hævelse fra sår	3-5 minutter	1-3 gange dagligt
Hævelse fra slag	3-5 minutter	1-3 gange dagligt
Blødninger under hud /hævelse fra slag	3-5 minutter	1-3 gange dagligt
Operations-ar	3-5 minutter	1-3 gange dagligt
Efter operation	1-3 minutter	1-3 gange dagligt
Sur stråle eller hovbyld	1-3 minutter	1-3 gange dagligt
Forfængenhed - lindring	1-3 minutter	3-5 gange dagligt
Bakterier	1-3 minutter	1 gang dagligt
Udefinerbar smerte akut	1-3 minutter	1-3 gange dagligt
Udefinerbar smerte kronisk	1-3 minutter	1-3 gange dagligt
Gigt	3-5 minutter	1-3 gange dagligt
Hofteledsdysplasi	3-5 minutter	1-3 gange dagligt
Tætsiddende torntapper/Kissings spine	3-5 minutter	1-3 gange dagligt
Led fraktur	3-5 minutter	1-3 gange dagligt
Knogle fraktur	3-5 minutter	1-3 gange dagligt
Seneskade/ligament skade	1-3 minutter	1-3 gange dagligt
Bindevævssmerter	1-3 minutter	1-3 gange dagligt
Overbelastning/spændinger/mioser	3-5 minutter	1-3 gange dagligt
Arvæv reduktions	3-5 minutter	1 gang dagligt
Rynker hos mennesker	1-3 minutter	1 gang dagligt
Hudproblemer hos mennesker	1-3 minutter	1 gang dagligt
Psoriasis hos mennesker	1-3 minutter	1 gang dagligt
Rosacea hos mennesker	1-3 minutter	1 gang dagligt
Acne hos mennesker	3-5 minutter	1 gang dagligt
Solskader hos mennesker/dyr	1-3 minutter	1 gang dagligt
Øger hårvækst hos mennesker/dyr	1-3 minutter	1 gang dagligt
Reducerer eftervirkninger fra Kemo-behandlinger kun pads	1-3 minutter	efter behov
Reducerer herpes-virus-sår og nedsætte risiko for nye sår	1-3 minutter	1 gang dagligt
Kan nedsætte depression - kun pads		efter behov
Migræne/hovedpine	1-3 minutter	efter behov
Akupunktur-behandling	1-3 minutter	1 gang dagligt
Median-bane påvirkning	1-3 minutter	1 gang dagligt
Hælespore	1-3 minutter	indtil ønsket effekt
Stress	1-3 minutter	indtil ønsket effekt
Nervesmerter mest effekt ved pads hvis større område	1-3 minutter	1-3 gange dagligt
Ledbåndsskade/forvridning	3-5 minutter	1-3 gange dagligt

* afhængig af hvor stor drejningen er!

Vejledningen er udelukkende ment som en guide, rådfør dig altid med din dyrlæge eller behandler.

WAVE RLT PEN 2.0

WAVE RLT PEN 2.0

Smart lille håndholdt lysterapi pen til de steder hvor du har brug for intens behandling
God til akupunktur punkter, triggerpoints, inde i øre, små sår, sacoider, hove, hovbylder, knæskader, spot-behandling.

Er med 5 bølgelængder

Rødt lys: 630 nm , 660 nm - synlig

Dyb rødt lys: 710 nm - meget svagt synlig

Nær-infarød lys: 850 nm - 900 nm ej synlig

Behandlingstid 0,5-5 minutter

Effekttæthed: 300 mW/cm²

Med pulserende effekt + 10HZ for bedre blodgennemstrømning og dybere behandling

Slukker efter 5 minutters brug - hold 1-3 minutters pause før du behandler igen.
Medfølger sikkerhedsbriller, etui, pudseklud til linsen, oplader, 2 stk genopladelige batterier, samt strop der kan vedhæftes bunden af WAVE RLT PEN

PRIS: 1500,- Dkk

Netto vægt: 200 g

Bølgelængder: 630, 660, 710, 850 & 900nm

Effektstæthed: 10 cm fra 98mW/cm²

Mål: 30 x 126 mm

Materiale: Rustfrit stål

Effektstæthed: På overfladen: 300 mW/cm²



Pakken indeholder:

WAVE RLT PEN 2.0

Opbevaringstaske med lynlås

2 stk genopladelige batterier 18650

Batteri-oplader

USB stik til oplader

Beskyttelses-briller

Brugermanual

Sådan bruger du WAVE RLT PEN 2.0

I vores WAVE RLT PEN 2.0 bruger vi en kombination af 5 forskellige LED'er, som er udvalgt til at give den bedste biologiske effekt overalt på kroppen.

De 5 lysbølger er 630 nm rødt lys, 660nm, 710 dybrødt lys (meget lidt synlig), 850 nm & 900 nm nær-infarødt lys (usynlig for det menneskelige øje)

Bemærk at du kun vil se det som om at 2 lys er tændt - de 3 andre udsender lysbølger som du ikke kan se. Det er helt normalt.

Nogle heste oplever effekten af lysterapi næsten med det samme, andre oplever det over en længere periode på ca. 3 uger.

Det afhænger meget af skaden, og alderen på skaden.

Derfor anbefaler vi at man bruger en 3-ugers plan - før man sammenligner effekten.

Hvis du oplever effekten med det samme, så skal du fortsætte med at behandle.


Oplever du ikke at hesten reagerer så er det også normalt. Du skal blot fortsætte med at behandle, men øge behandlinger fra 1 gang om dagen, til 3 gange om dagen, med op til 3 minutters varighed, i 3 uger.

Efter 3 ugers konstant behandling vil de fleste heste mærke en forandring.

Hvis du behandler med et andet produkt, så skal du ikke pludseligt stoppe den behandling, når du begynder på lysterapi, med mindre du føler at behandlingen ikke virker.

Du kan sagtens fortsætte din behandling fra dyrlægen, men hør altid dyrlægen ad, om det har nogen dårlig virkning hvis du behandler med lysterapi.


Dyrlægerne vil sjældent bede dig om IKKE at bruge lysterapi.

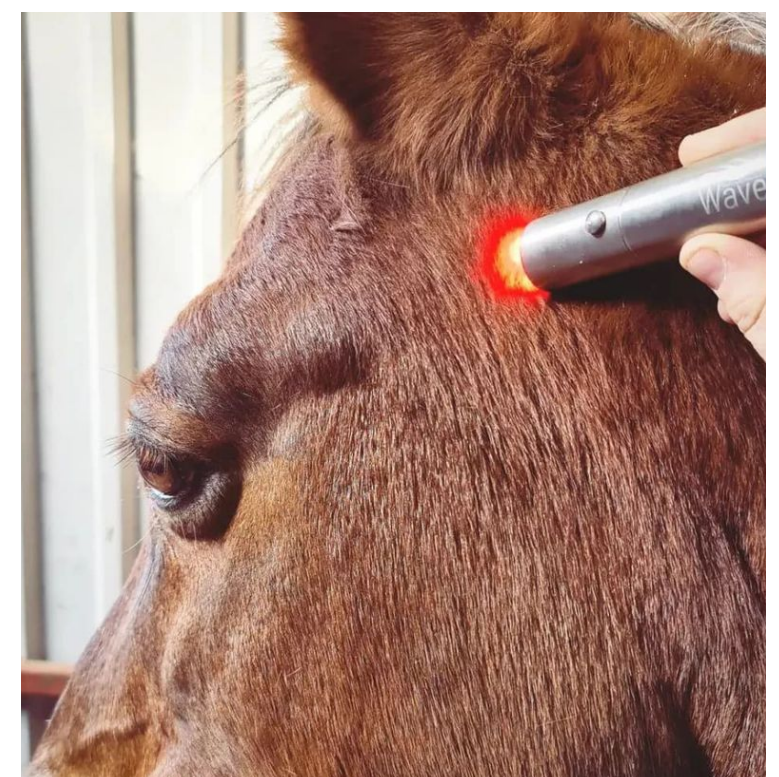

Hold WAVE RLT PEN 2.0 hen over det område du vil behandle. Du kan enten holde den helt ind til huden, eller op til 15 cm fra. Jo længere væk desto svagere behandling.

Brug ikke WAVE RLT PEN 2.0 i mere end 5 minutter af gangen. Hold en pause mellem hver behandling på ca. 2-3 minut eller til enheden er kølet lidt ned. Så undgår du overophedning af enheden.

Funktioner i WAVE PEN 2.0

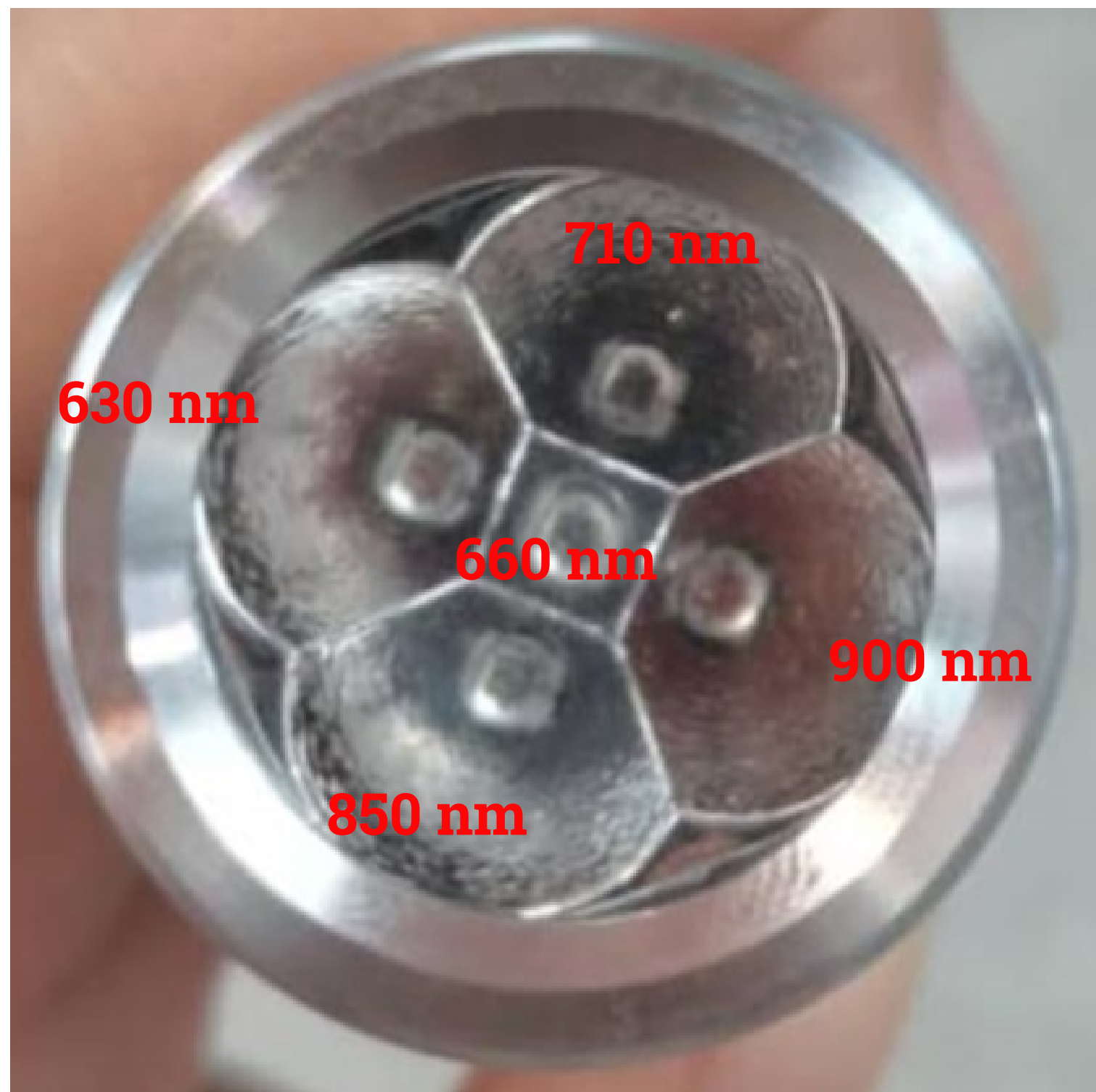

Bølgelængder: 630, 660, 710, 850, 900 nm

Timer: Slukker automatisk efter 5 minutters brug - hold en pause på 1-2 minutter eller indtil enheden er kølet ned.

WAVE RLT PEN 2.0 har 6 forskellige funktioner

- 1) TRYK 1 gang. Alle LED lyser på én gang
- 2) TRYK 2 gange. Kun rødt lys lyser. 630 & 660 nm
- 3) TRYK 3 gange. Kun nær-infrarødt lys lyser. 710, 850 & 900nm
- 4) TRYK 4 gange. Alle LED lyser med pulserende lys + 10HZ
- 5) TRYK 5 gange. Kun rødt lys lyser med pulserende lys + 10HZ
- 6) TRYK 6 gange. Kun nær-infrarødt lys lyser med pulserende lys + 10HZ
- 7) TRYK 7 gange. Enheden slukker

Veiledning til behandling med WAVE RLT PEN 2.0

Major in French; Bachelor of Arts

Agents: U.S. Trust Periodicals

Plant-infringement + rabbit-fox-bird-and-lung

[illegible]

* attestation af træer efter drejningen er

* afhængig af hvor stor drejningen er!



WAVE RLT PEN & triggerpoints

Du kan med fordel bruge de akupunktur punkter der findes på heste.
Du kan også bruge den direkte på sår eller sacoider, muk, svamp eller andre hudlidelser.

Her har du en tegning over de områder du kan påvirke.

Men rådfør dig altid med en dyrlæge hvis du er i tvivl.

Du kan også nemt lægge din WAVE RLT Pad i det område.

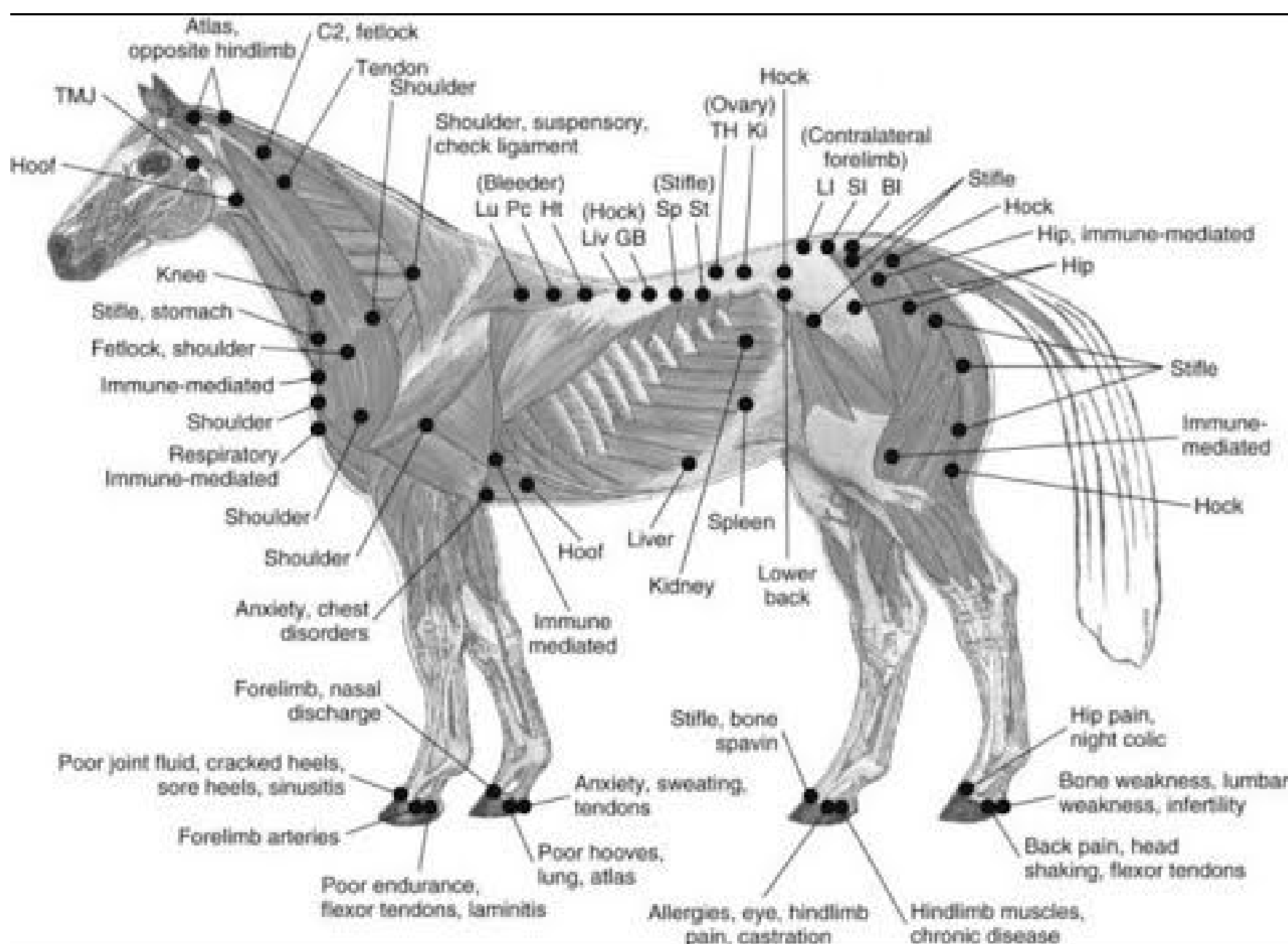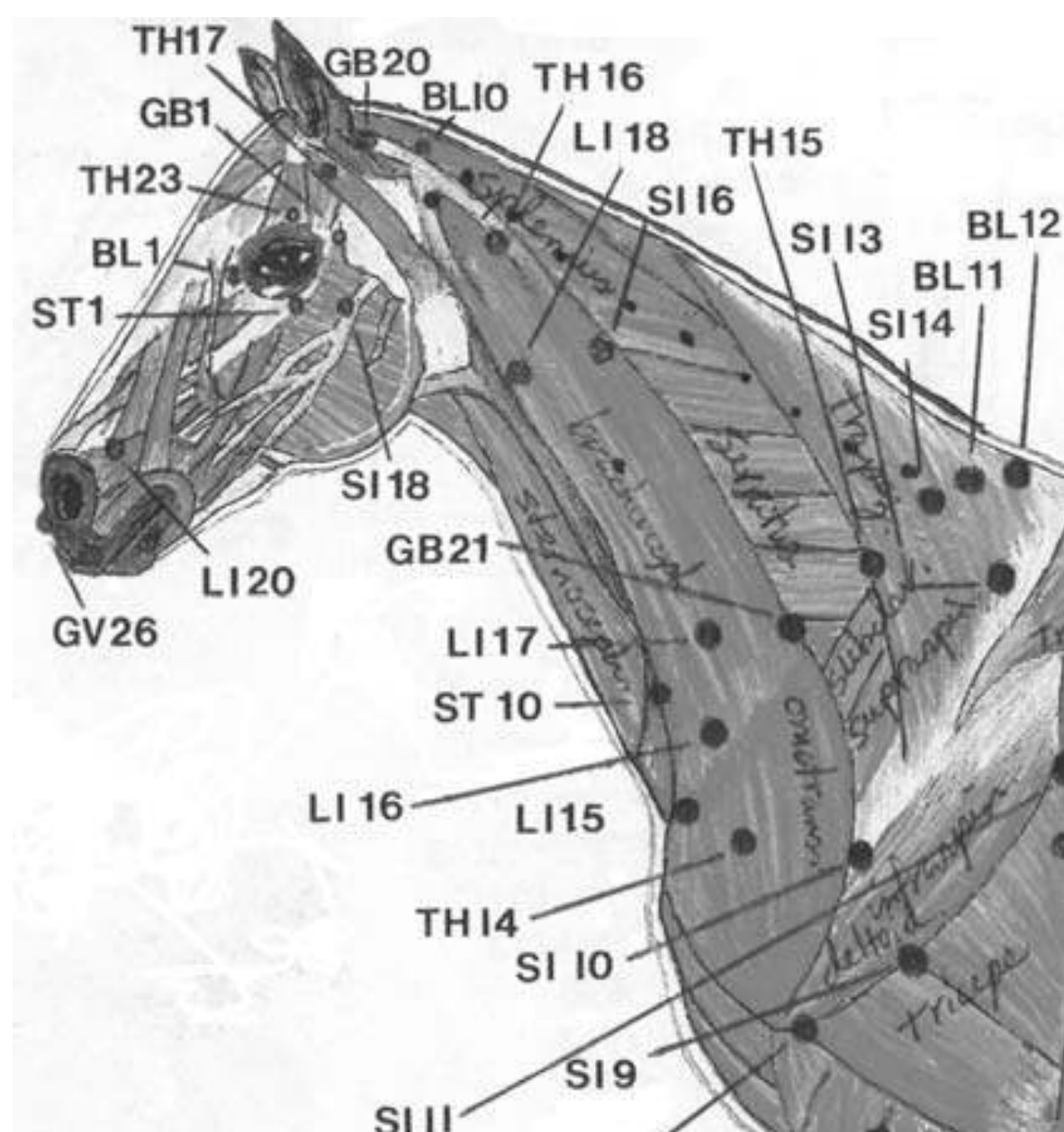

Du kan med fordel bruge de akupunktur punkter der findes på heste med både
WAVE RLT PEN & WAVE RLT Pads

Du kan også bruge den direkte på sår eller sacoider, muk, svamp eller andre hudlidelser.

Her har du en tegning over de områder du kan påvirke.

Men rådfør dig altid med en dyrlæge/behandler hvis du er i tvivl. De vil helt sikkert gerne
vise dig hvor du kan give behandling på DIN hest.



Husk at lysterapi ingen bivirkninger har.
Så det er helt sikkert for dig at bruge.
Lys aldrig ind i hestens øjne!

Før & Efter


Sacoid på hest
før/efter 1 uges behandling 1
gang dagligt




Svamp hos hest efter 2 ugers
behandling

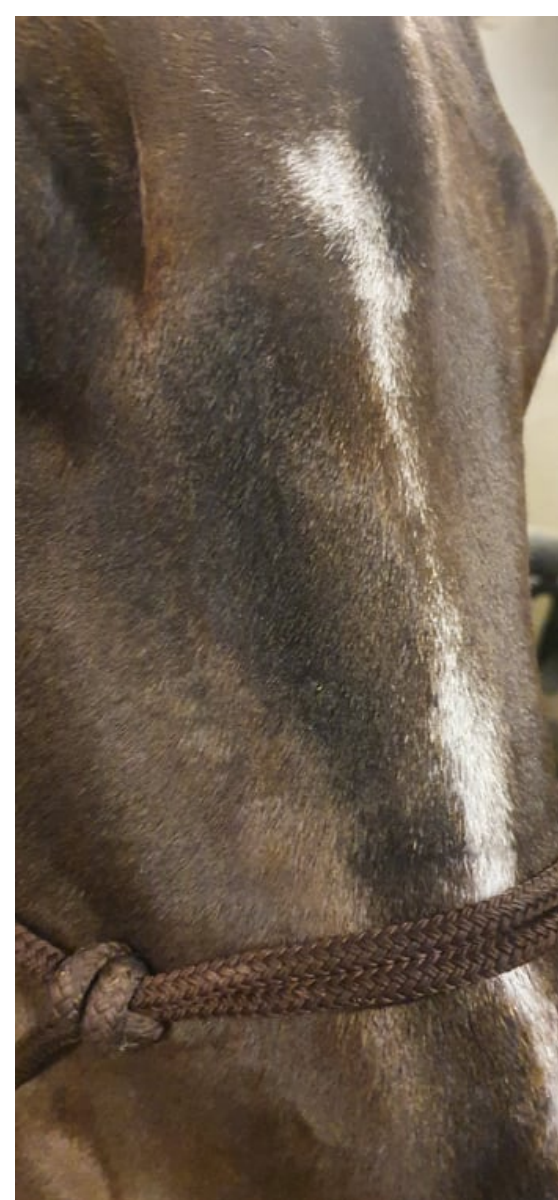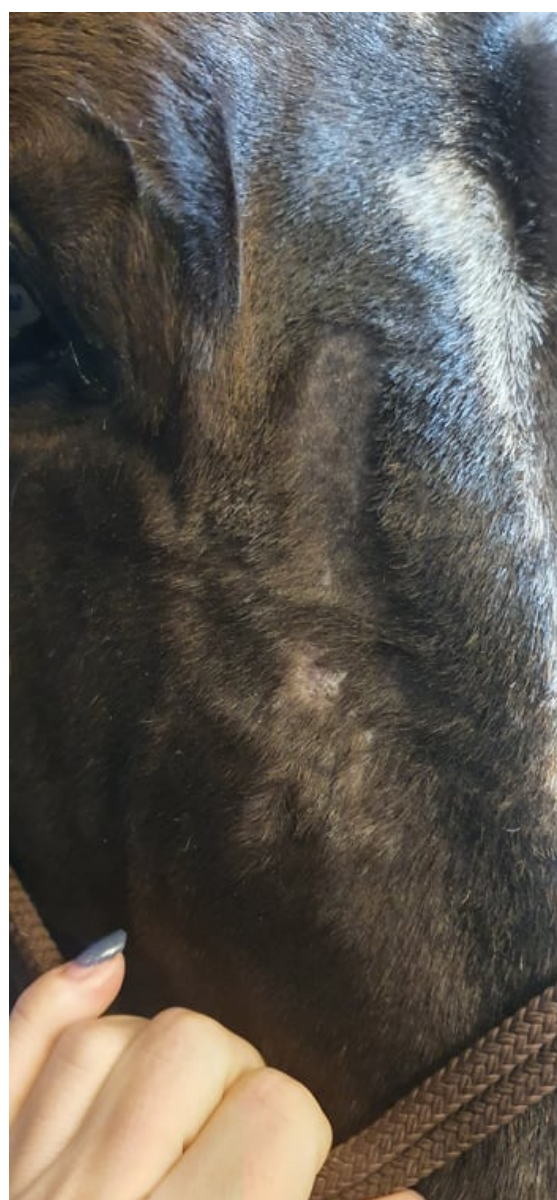

Hegnsskade med pæl
1,5 md mellem billeder
Hesten er kommet sig 100% efter skaden. Og skaden er
helet hurtigere end dyrlægen havde forventet

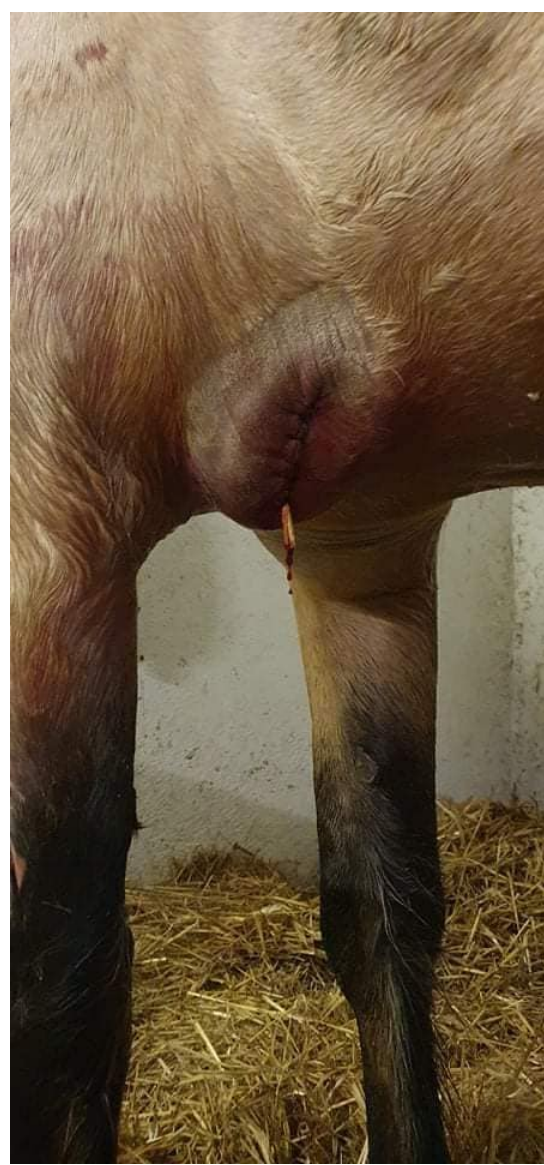

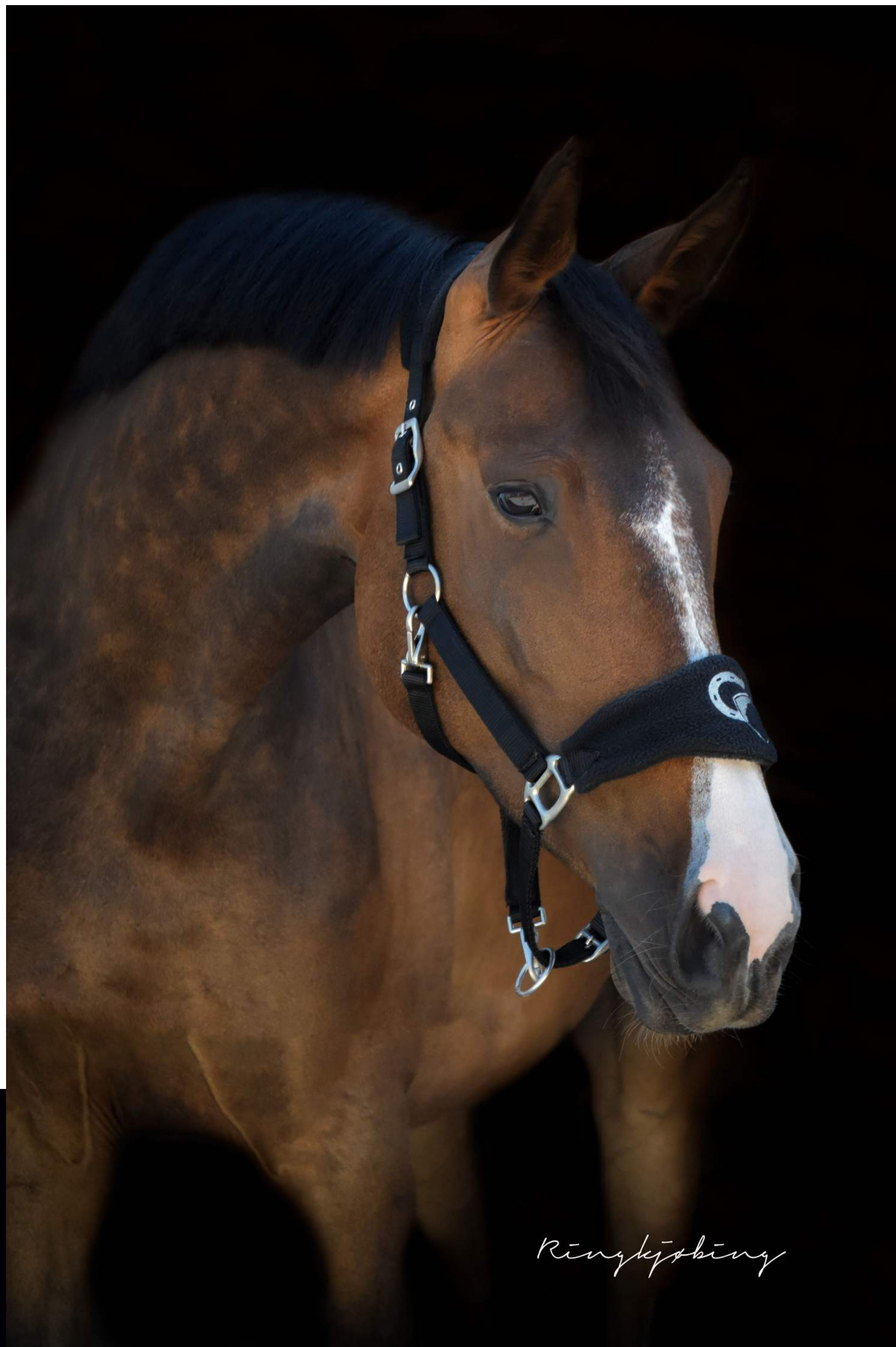

Ringkjøbing



Red Light Therapy
Wave

En del af Cavaleros

www.cavaleros.dk

Middelfartvej 6E, Dk-4200 Slagelse - Tlf.: +45 6073 7722